



THEYFIT, de eerste condoms met individuele pasvorm ter wereld: 95 verschillende maten voor extra comfort en meer plezier.

Volg onderstaande instructies om uw ideale condoom te vinden.

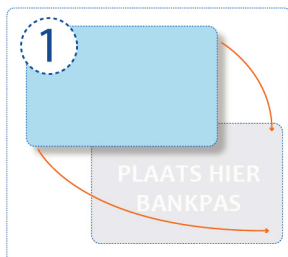


1) Controleer of uw FitKit™ goed is geprint, door te kijken of een bankpas past in het kader onderaan deze pagina. Als de bankpas of creditcard past, dan is uw printer goed ingesteld. Zo niet, wijzig dan uw printerinstellingen. Hulp nodig? www.TheyFit.com

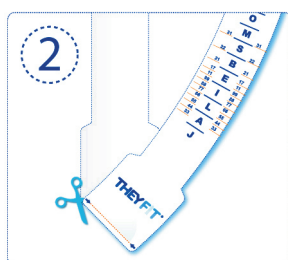

2) Knip langs de stippellijnen het sjabloon uit. De lengte wordt met letters aangegeven, de breedte met cijfers.



3) Om uw lengte te bepalen: Plaats de strook onder de penis in erectie, zover als een condoom zich tot aan de onderkant van de penis zou onttollen: uw lengte wordt aangegeven met een letter.

4) Om uw breedtemaat te bepalen: Vouw de strook rond het midden van uw penis in erectie. Bij de pijl ziet u een getal dat uw breedtemaat aangeeft.

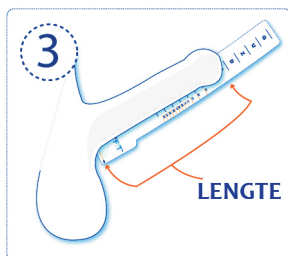

5) Uw maat bestaat uit de combinatie van uw lengteletter en breedtemaatgetal.

Nota Bene: de individuele maat die u met de FITKIT™ opmeet, is een advies. U kunt naar eigen voorkeur ook een andere maat kiezen. Als uw combinatie er niet bij staat, kies dan een maat in de buurt. Kies in dat geval het condoom liever wat langer of wat strakker. Dat is beter dan een condoom dat te kort of te breed is. Een goed passend condoom sluit nauw aan en zit prettig.

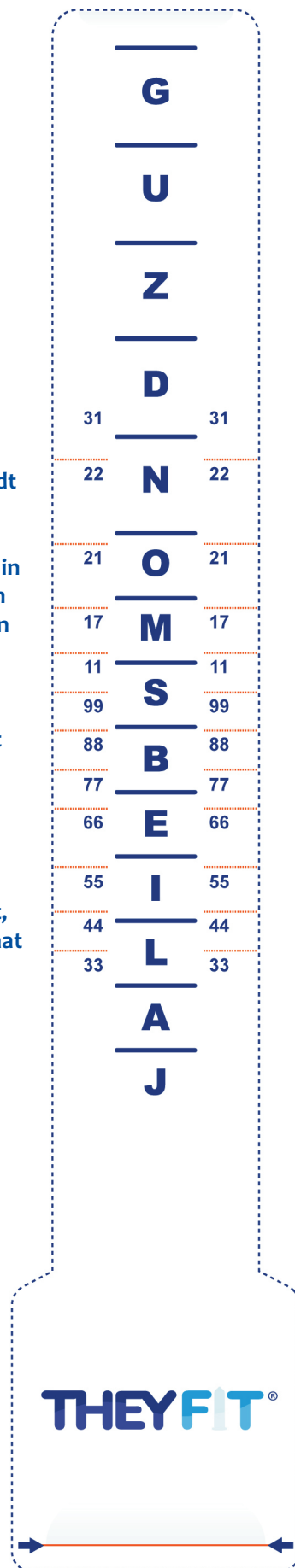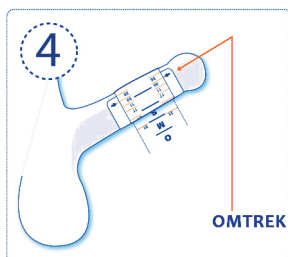

TheyFit®, FitKit™ & TheyFit® logo are trademarks of TheyFit LLC by © All Rights Reserved. FitKit™ & TheyFit® distribution strictly by authorised representatives only. Warning: TheyFit® might seriously improve your sex life! AUGUST 2011.

ENHANCED: FitKit™ - VERSION 2011:01 - [vertaling Condomerie: januari 2013] ALWAYS USE THE MOST UP TO DATE FitKit™ TO MAXIMISE FITTING ACCURACY AND FITTED COMFORT - CHECK THEYFIT.COM FOR MORE DETAILS.